

Chito-SAM™ 100

Гемостатичний засіб з 100% хітозану * Кровозупинний засіб



Chito-SAM™ 100 є високопродуктивним гемостатичним засобом з 100% хітозану та призначений для швидкої зупинки летальної кровотечі. Це простий у використанні, надзвичайно ефективний і безпечний засіб. Це медичний засіб з CE-маркуванням класу III.

Chito-SAM™ 100 працює незалежно від нормального процесу згортання крові.

На відміну від більшості гемостатичних пов'язок, Chito-SAM™ 100 виготовлений з нетканого, 100% чистого хітозану.

Кровозупинна продуктивність надзвичайно ефективна, порівняно з продуктами, просоченими або покритими хітозаном. Він згортає кров в 3 рази швидше, ніж конкурентні продукти, в клінічних тестах згортання.


ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПЕРЕВАГИ
<ul style="list-style-type: none">• 100% чистий медичний хітозан• Легко видаляється водою або фізіологічним розчином• Стерильна, водонепроникна упаковка	<ul style="list-style-type: none">• Контролює кровотечу протягом декількох хвилин• Упаковка з можливістю розриву в будь-якому місці для швидкого доступу• Легко застосовується

Опції

Код продукту	Розмір
CTS100-04	Гемостатична марля 4in x 4in (10x10cm), упаковка з можливістю розриву в будь-якому місці Dealer price: \$7.50 40/case Case price: \$300
CTS100-06	Гемостатична марля 3in x 6ft (7.6cm x 1.83m), складена гармошкою, упаковка з можливістю розриву в будь-якому місці Dealer price: \$22 15/case Case price: \$330
CTS100-10	Гемостатична марля 3in x 10ft (7.6cm x 3.05m), складена гармошкою, упаковка з можливістю розриву в будь-якому місці Dealer price: \$28 15/case Case price: \$420

Використання

1. Відповідно до розміру рани та сили кровотечі виберіть розмір та кількість пакетів.
2. По можливості одягніть медичні рукавички. Відкрийте пакет із засобом.
3. Дістаньте складений гармошкою засіб.
4. Заповніть рану засобом.
5. Щоб зупинити кровотечу, затисніть рану із засобом до зупинки кровотечі, мін. 3хв.
6. Закріпіть рану з матеріалом за допомогою давлячої пов'язки перев'язочним пакетом.
7. Якомога скоріше доставте потерпілого до найближчого пункту першої медичної допомоги.
8. Передайте порожній пакет від препарату медичним працівникам.

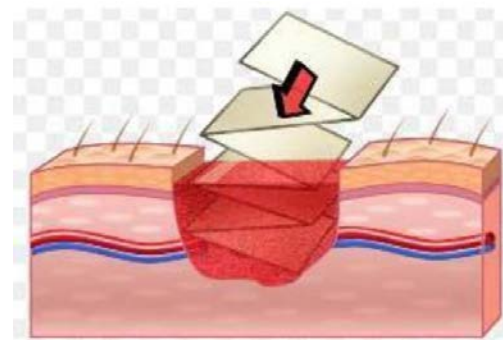

Залишки препарату з рани видаляються шляхом промивання стерильною водою або фізіологічним розчином.

Лише для зовнішнього одноразового використання! Стерильно.

Виробник: SAM Medical Products sammedical.com

Агент по продажу: Datafly Co. e-mail: sammedical@datafly.com phone: 503-452 8460